

Die neue OrCam MyEye/MyReader

Die neue Hightech-Lesehilfe

Wie funktioniert das Lesen mit der OrCam?



- 1.) Befestigen Sie den kleinen Gummiring mit den beiden Magneten am rechten oder linken Bügel Ihrer NuCentro.
 - 2.) Setzen Sie die OrCam-Minikamera auf die Magnete.
 - 3.) Schalten Sie die OrCam an der Steuerkonsole an und verstauen Sie diese in Ihrer Hosentasche oder befestigen Sie sie an Ihrem Gürtel.
 - 4.) Zeigen Sie nun mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Texte in Druckschriften oder auf Schildern oder Produkten. Die OrCam wird nun ein Bild der Texte erstellen, dieses verarbeiten und Ihnen vorlesen.
- Auf diese Weise erkennt die OrCam auch die Menschen und Farben in Ihrer Umgebung.

Technische Spezifikation

- Prozessor: i.Mx 6 Quad
- Betriebssystem: Linux
- Lithium-Polymer-Akku 3700 mAh
- 4 Stunden Dauerbetrieb bzw. bis zu 12 Stunden bei unterbrochenem Betrieb
- Minikamera: 8 MPixel
- Abmessungen:
 - Steuerkonsole: 130 x 54 x 22 mm (B x H x T)
 - Minikamera: 80 mm
- Gewicht:
 - Steuerkonsole: 163 Gramm
 - Minikamera: 31 Gramm

Augenoptik Foto Studio
Geldmacher GmbH

Unterstraße 63
D-31162 Bad Salzdetfurth

Tel.: 0 50 63 - 95 96 - 0
Fax: 0 50 63 - 95 96 - 23

office@geldmacher.com • www.geldmacher.com

Lieferumfang

- Komfort-Steuerkonsole (inkl. Akku) mit kabelgebundener Minikamera
- Gürtelhalteclip für Komfort-Steuerkonsole
- Haltering zur Befestigung der Minikamera an einem Brillengestell (z. B. NuCentro)
- Kopfhörer, Schutztasche, Netzteil, Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung (Schwarzschrift-Handbuch)

Erleichterung für den Alltag

OrCam - Die Hightech-Lesehilfe für Menschen mit Altersbedingter Makuladegeneration



Scannen Sie diesen QR-Code einfach ab und gelangen direkt auf unsere Webseite




Die OrCam MyEye/MyReader ist die perfekte Ergänzung zur AMD-Brille „NuCentro“.

Die diskret an der Brille angebrachte hochauflösende Minikamera unterstützt den Anwender vielfältig bei der Orientierung im Alltag.

Sie wurde konzipiert um, Sehbehinderten oder Menschen mit AMD oder einer Leseschwäche wieder Zugang zu Texten zu ermöglichen. Die intuitiv mit einem Fingerzeig aktivierbare Kamera liest sofort gedruckte und digitale Texte laut von jeder Oberfläche ab.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Die OrCam erkennt Texte, Menschen, Produkte, Farben sowie Geldscheine. Und all das in Echtzeit.

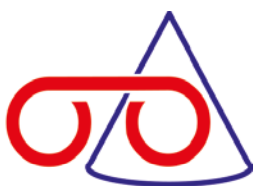

Geldmacher
AUGENOPTIK

Besuchen Sie uns im Internet unter www.geldmacher.com

Die OrCam ist
die perfekte
Ergänzung zur
NuCentro-
AMD Brille

„Wenn ich die OrCam auf
dem Flughafen verwende,
spielt meine Behinderung
keine Rolle. Ich kann die
Schilder selbst lesen.“

„Die Anwendung ist so ein-
fach, dass ich im Alltag gar
keinen Unterschied merke.
Die OrCam hat mein Leben
wirklich positiv verändert.“

Lesen + Erkennen per Fingerzeig

Lassen Sie sich doch einfach vorlesen und beim Einkauf helfen

Ob Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beschilderungen,
Busfahrpläne, Beipackzettel, Speisekarten oder Tages-
post – die OrCam liest Ihnen alles diskret vor. Zeigen
Sie einfach auf einen Text, und die OrCam liest ihn die-
sen automatisch vor.






Sogar blinde Nutzer können die OrCam einsetzen.
Einfach die Vorlesetaste drücken, und die OrCam liest
Ihnen Beschriftungen und Texte vor, die sich in ihrem
„Blickfeld“ befinden.

Zudem hilft Ihnen die OrCam beim Einkaufen, indem
sie für Sie die Verpackungen vorliest. Damit Sie zu
Hause oder beim Einkaufen Ihre Lieblingsprodukte
schneller finden, können Sie diese zudem abspeichern.
Dank der OrCam kann man sicher sein, tatsächlich die
gewünschte Schokolade zu essen oder das richtige
Pflegeprodukt zu verwenden.

Erkennen Sie Gesichter

Nach einer schnellen, einmaligen Einrichtung werden
vorher gespeicherte Gesichter von bis zu 100 Personen,
die für Sie wichtig sind – Familienmitglieder, Freunde,
Arbeitskollegen - aus bis zu drei Metern Entfernung
problemlos erkannt und mit ihrem eigenen Namen
diskret angekündigt, sobald sie ins Blickfeld der intelli-
genten Kamera der OrCam kommen.

Bei nicht gespeicherten Personen können hilfreiche
Informationen angesagt werden, wie z.B. ob die Per-
son, die vor Ihnen steht, ein Kind, ein Mann oder eine
Frau ist.

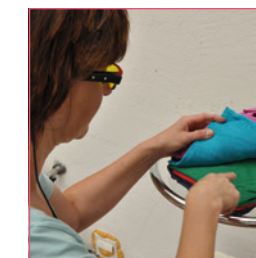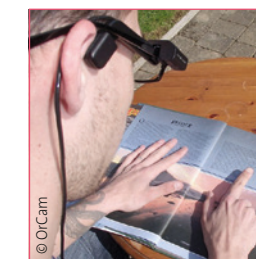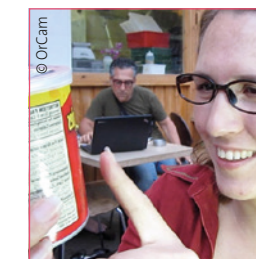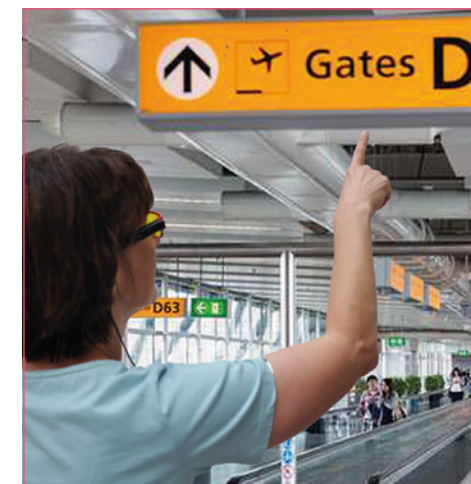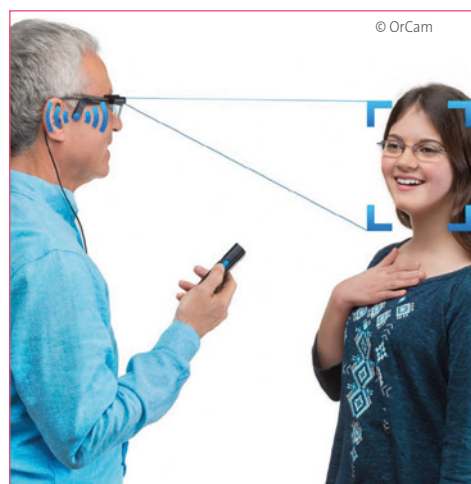

Die OrCam erkennt Banknoten und hilft Ihnen bei der Farbauswahl

Bezahlen mit Bargeld wird dank der Geldschein-Erkennung kinderleicht.
Wählen Sie ein Hemd, suchen Sie ein Geschenk aus und kaufen Sie selbstbe-
wusst ein – mit schneller und präziser Farberkennung.